


Isolement et identification présumptive de *V. cholerae* O1/O139 à partir d'échantillons de selles

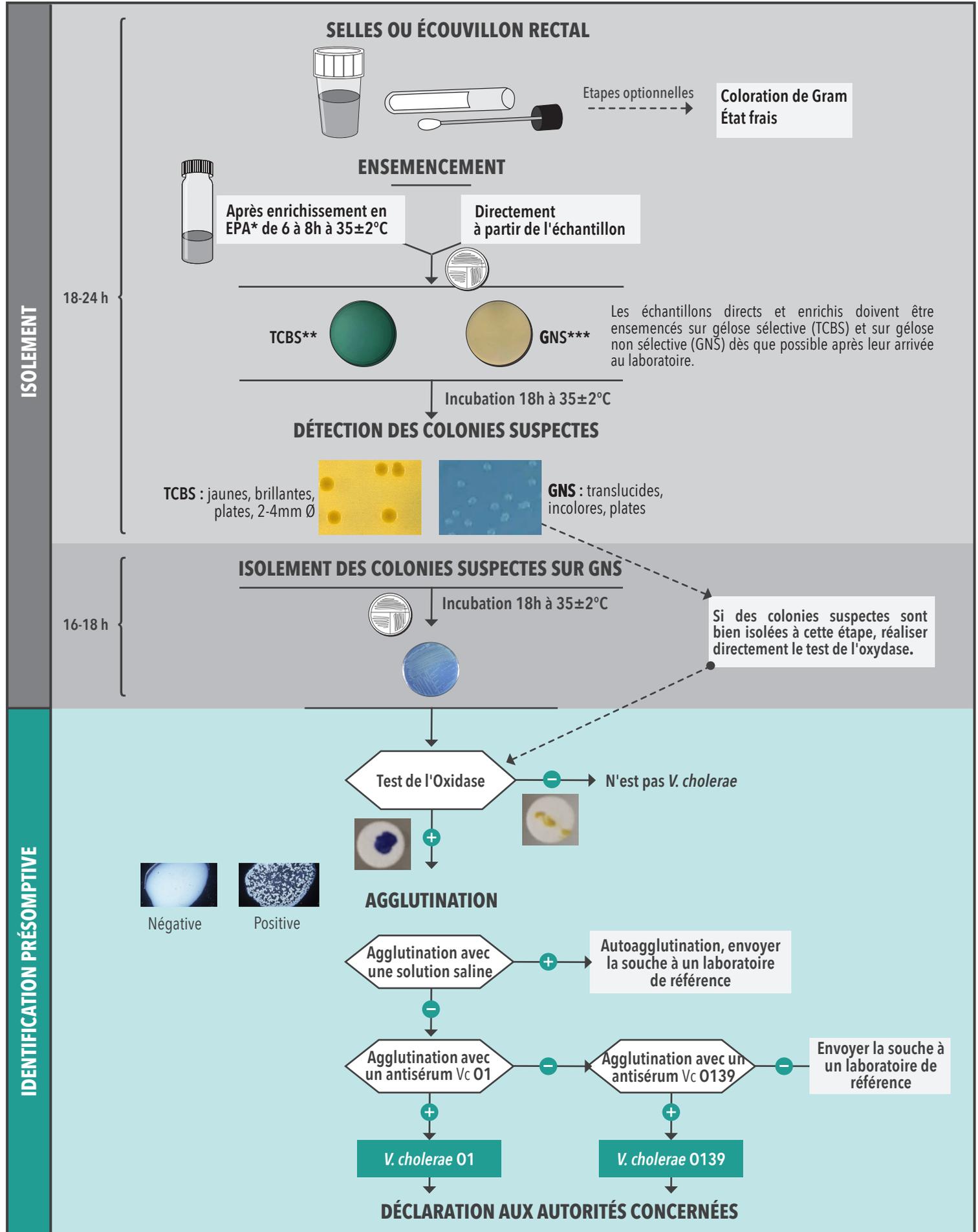

*EPA: Eau Peptonée Alcaline

TCBS: milieu Thiosulfate Citrate Bile Saccharose, gélose sélective recommandée pour les vibrios. La gélose MacConkey (sur laquelle les colonies de *V. cholerae* sont lactose négative) est une autre option, mais elle n'est pas recommandée en première intention. *GNS: Gélose Non Sélective, telle que Mueller Hinton (recommandée), Gélose cœur-cervelle (BHI Agar, Brain Heart Infusion Agar) ou gélose Trypticase Soja (TSA, Trypticase Soy Agar).

Note : les isolats confirmés *V. cholerae* O1 ou O139 par les tests sérologiques doivent faire l'objet d'une caractérisation plus poussée.