

Guia de Referência Rápida *Para instruções mais detalhadas, consulte o folheto informativo do fabricante*

Indicações para uso

- Os TDRs não são usados para diagnóstico individual
- TDRs são usados para vigilância para 1) acelerar a detecção e 2) monitorização de surtos
- Considere a estratégia de teste aplicada atualmente em sua área
- Execute TDR em amostras de fezes frescas, dentro de 2 horas após a coleta

Antes de começar

- Verificar datas de validade e condições de armazenamento
- Certifique-se de que todos os componentes do kit estão à temperatura ambiente antes do teste
- Desinfete o espaço de trabalho
- Usar equipamento de proteção individual adequado. Usar luvas novas ao manusear fezes para TDRs



No final

- Coloque todos os resíduos num saco de risco biológico com revestimento duplo ou num contentor para objetos cortantes, desinfete o espaço de trabalho
- Retire as luvas e lave as mãos
- Registar todos e quaisquer resultados de TDR num registo em papel ou eletrónico
- Relatar todo e qualquer resultado de TDR, incluindo resultados inválidos e não reativos
- As amostras podem ser transportadas para testes adicionais com base na estratégia de teste




- 1** Rotule o tubo de recolha da amostra com o identificador do doente e, em seguida, abra a tampa.




Tubo de recolha de amostras


- 2** **Amostras fecais semissólidas:** Recolher amostras suficientes utilizando a zaragatoa de recolha e inserir a zaragatoa no tubo de recolha e rodar a zaragatoa pelo menos 10 vezes.

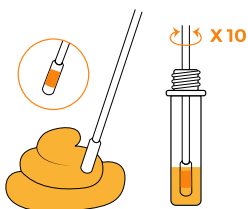


- Amostras fecais líquidas:** Retirar amostras líquidas até à linha de enchimento utilizando o conta-gotas e transferir para o tubo de recolha de amostras.

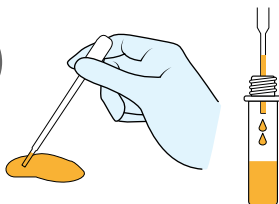


- 3** **Amostras fecais semissólidas:** Retire o cotonete enquanto aperta contra a parede do tubo. Voltar a tapar firmemente o tubo de recolha da amostra.

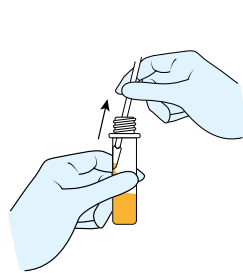


- Amostras fecais líquidas:** Elimine o conta-gotas. Voltar a tapar firmemente o tubo de recolha da amostra.

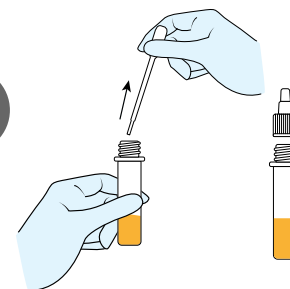


- 4** Agitar cuidadosamente o tubo para assegurar a mistura adequada da amostra fecal com tampão de extração.

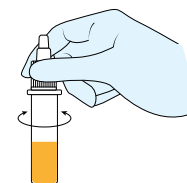


- 5** Desenrosque a tampa do bico do tubo de recolha da amostra.

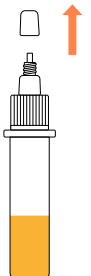



- 6** Abra cuidadosamente a bolsa de teste. Rejeitar se estiver danificado ou se o excisante estiver ausente ou alterado. Escreva o ID do paciente no.

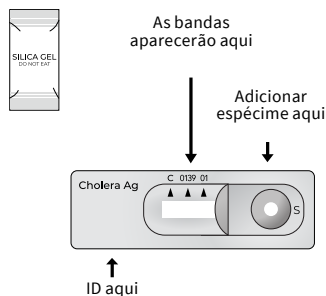


- Segure o tubo de recolha na vertical e introduza 3 gotas no poço "S" da amostra.

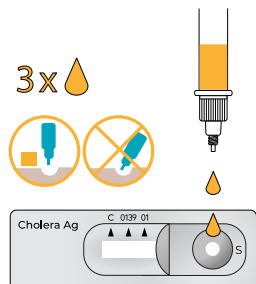

- 7** **Aguarde 15 minutos** e leia o resultado.

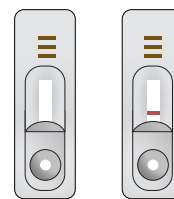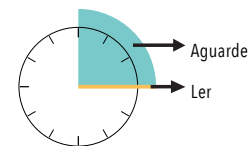

Testes inválidos

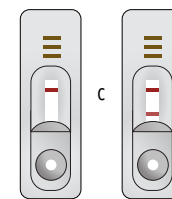

Testes válidos

Para mais informações


[Formulários de referência e relatórios do GTFCC](#)

[Aplicação móvel GTFCC](#)

Formação:
Recolha de amostras e testes com Testes de Diagnóstico Rápido da cólera para profissionais de saúde

Confirme se a banda de controlo está presente antes de ler as bandas de teste

Coloque a de teste no espaço abaixo. Compare as bandas com os exemplos abaixo. Qualquer banda de teste, por mais fraca que seja, deve ser considerada um resultado de teste reativo.

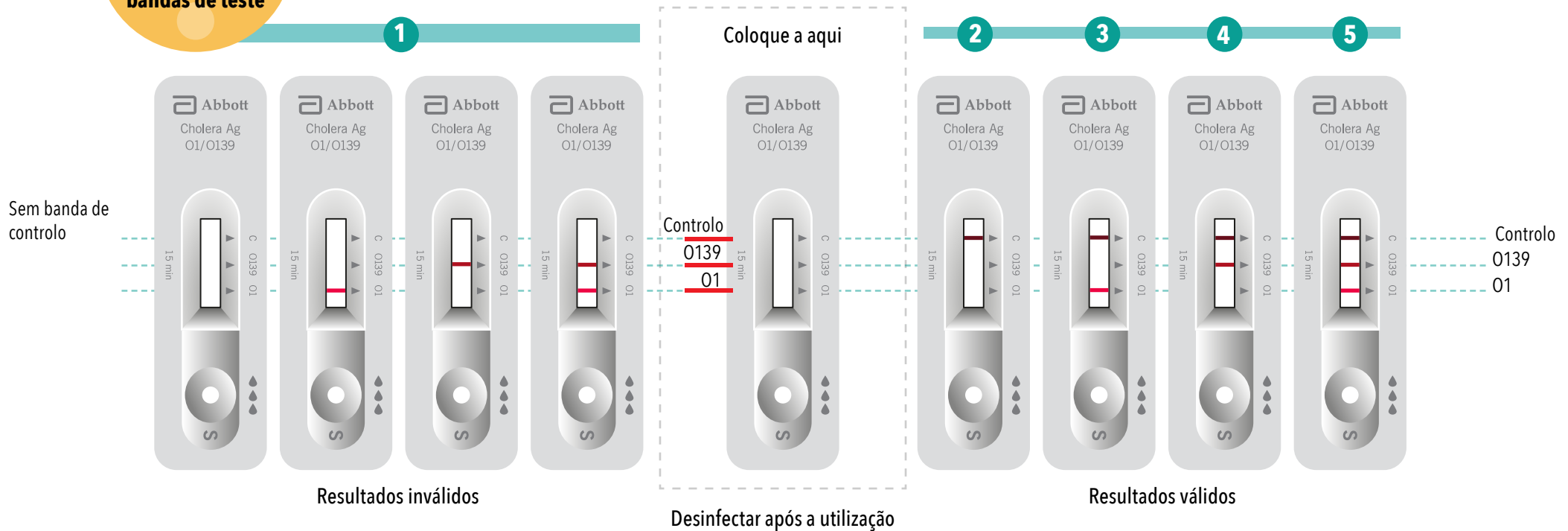

RESULTADOS E AÇÕES

Registe todos os resultados no(s) registo(s) adequado(s) e comunique os resultados finais no formulário adequado de gestão de casos e nos formulários de encaminhamento laboratorial.

	Bandas de teste	Resultados	Ações
1	Sem banda de controlo	Inválido	Repetir usando um novo teste
2	Apenas banda de controlo	Non-réactif	Relatório como VC não reativo
3	Controlo da banda VC O1	VC O1 reativo	Relatório como VC O1 reativo
4	Controlo da banda VC O139	VC O139 reativo	Repetir o teste, se o 2º resultado for o mesmo, reporte como VC O139 reativo. Enviar amostra para laboratório para testes adicionais
5	Controlo & VC O1 & VC O139	VC O1 & VC O139 reativo	Repetir o teste, se o 2º resultado for o mesmo, reporte como VC O1 & VC O139 reativo. Enviar amostra para laboratório para testes adicionais

Vibrio cholerae 0139 é incomum fora do Sudeste Asiático, Se o RDT mostra uma banda para 0139 deve ser considerado no contexto – a área em que você está e se houver um surto atual de VC 0139. Quando o 0139 é um resultado inesperado, são sempre necessários mais testes.