

Guia de Referência Rápida *Para obter instruções mais detalhadas, consulte a bula do fabricante*

Indicações para uso

- Os TDRs não são usados para diagnóstico individual
- TDRs são usados para vigilância para 1) acelerar a detecção e 2) monitorização de surtos
- Considere a estratégia de teste aplicada atualmente em sua área
- Execute TDR em amostras de fezes frescas, dentro de 2 horas após a coleta

Antes de começar

- Verificar datas de validade e condições de armazenamento
- Certifique-se de que todos os componentes do kit estão à temperatura ambiente antes do teste
- Desinfete o espaço de trabalho
- Usar equipamento de proteção individual adequado. Usar luvas novas ao manusear fezes para TDRs



No final

- Coloque todos os resíduos num saco de risco biológico com revestimento duplo ou num contentor para objetos cortantes, desinfete o espaço de trabalho
- Retire as luvas e lave as mãos
- Registrar todos e quaisquer resultados de TDR num registo em papel ou eletrónico
- Relatar todo e qualquer resultado de TDR, incluindo resultados inválidos e não reativos
- As amostras podem ser transportadas para testes adicionais com base na estratégia de teste




1 Rotule o frasco para injetáveis de processamento da amostra com o identificador do doente e abra a tampa.




Frasco para injetáveis de processamento de amostras

2 **Amostras fecais semissólidas:** Recolher uma pequena quantidade de fezes utilizando a vareta de recolha e transferir para o frasco de processamento da amostra.

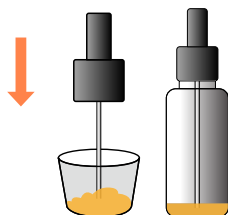


Copo de fezes

Amostras fecais líquidas: Retirar amostras líquidas utilizando o conta-gotas e transferir 2 gotas para o frasco para injetáveis de processamento da amostra.

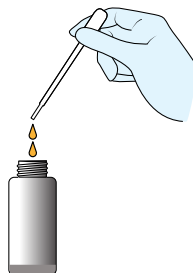

3 Retape firmemente o frasco para injetáveis de processamento da amostra e agite para misturar o conteúdo.

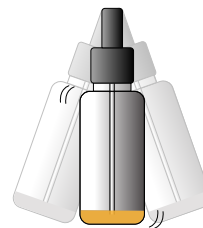

4 Retire a tampa transparente e parta a ponta azul (aponte e cubra com lenço de papel para evitar salpicos).



5 Introduzir 4 gotas de amostra transformada num tubo de ensaio de 5 ml rotulado.



6 Abra cuidadosamente a bolsa de teste. Rejeitar se estiver danificado ou se o excicante estiver ausente ou alterado de cor. Escreva o ID do paciente na vareta de imersão.

Colocar a vareta no tubo de ensaio com as setas viradas para baixo. Confirme se a extremidade da vareta está na amostra processada, mas as setas não estão submersas.




← Só toque aqui
← ID aqui
← As bandas aparecerão aqui
Sem banda de controlo = resultado inválido
Insira a vareta com as setas apontadas para baixo
← Área de imersão




7 **Aguarde 15-30 minutos** e leia o resultado..



Testes inválidos

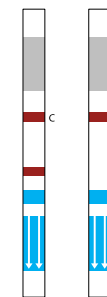

Testes válidos

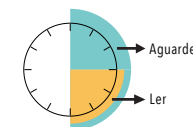


Para mais informações

[Formulários de referência e relatórios do GTFCC](#)

[Aplicação móvel GTFCC](#)

Formação:
Recolha de amostras e testes com Testes de Diagnóstico Rápido da cólera para profissionais de saúde

Confirme se a
banda de controle
está presente
antes de ler as
bandas de teste

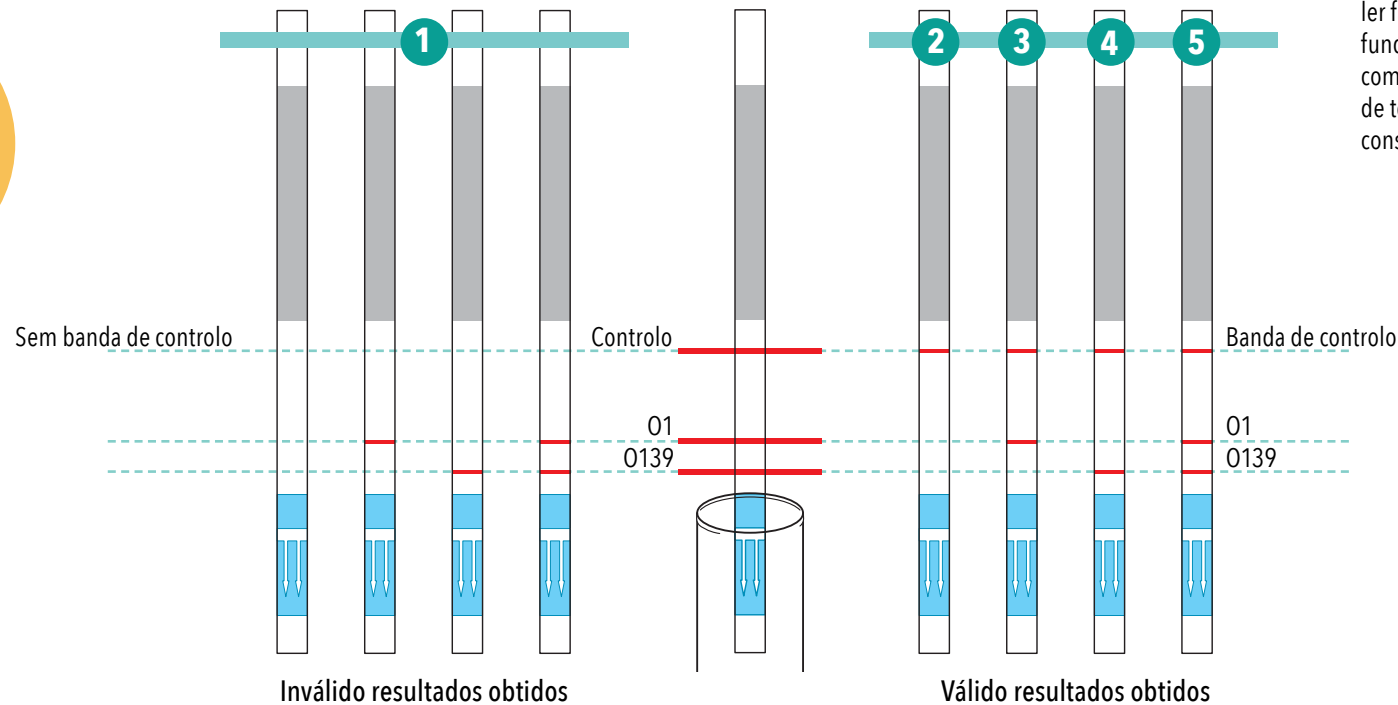

Levante a tira para cima para que possa ler facilmente as bandas, mas não retire o fundo da tira do tubo. Compare as bandas com os exemplos abaixo. Qualquer banda de teste, por mais fraca que seja, deve ser considerada um resultado de teste reativo.

RESULTADOS E AÇÕES

Registre todos os resultados no(s) registo(s) adequado(s) e comunique os resultados finais no formulário adequado de gestão de casos e nos formulários de encaminhamento laboratorial.

	Bandas de teste	Resultados	Ações
1	Sem banda de controle	Inválido	Repetir usando um novo teste
2	Apenas banda de controle	Não reativa	Relatório como VC não reativo
3	Controlo da banda VC 01	VC 01 reativo	Relatório como VC 01 reativo
4	Controlo da banda VC 0139	VC 0139 reativo	Repetir o teste, se o 2º resultado for o mesmo, reporte como VC 0139 reativo. Enviar amostra para laboratório para testes adicionais
5	Controlo & VC 01 & VC 0139	VC 01 & VC 0139 reativo	Repetir o teste, se o 2º resultado for o mesmo, reporte como VC 01 & VC 0139 reativo. Enviar amostra para laboratório para testes adicionais

Vibrio cholerae 0139 é incomum fora do Sudeste Asiático, Se o RDT mostra uma banda para 0139 deve ser considerado no contexto – a área em que você está e se houver um surto atual de VC 0139. Quando o 0139 é um resultado inesperado, são sempre necessários mais testes.